



Használati utasítás az ACUAISS nedvesítő szemcseppekhez

ACUAISS EYE RELAX 15 ml ACUAISS Ultra 10 ml – tartósítószer mentes ACUAISS Dual Gel – 10 ml

- Az ACUAISS Eye Relax az ACUAISS Ultra és az ACUAISS Dual Gel szemcsepp a kontaktlencse komfortosabb viseletének segítésére készült.
- Használja az ACUAISS szemcseppet, ha száraznak érzi a szemét, ill. ha a lencsét hosszán
- viseli.
- Felbontás után 60 napig használható.
- Gyermekek elől elzárva tartandó!

Használata:

1. Használat előtt mindig mosson kezet.
2. Cseppentsen 1-2 cseppet a szemébe, majd tartsa a szemét rövid ideig csukva.
3. A kicsorduló folyadékot törölje le az arcáról.
4. SOHA NE ÉRINTSE A CSEPPENTŐ VÉGÉT, ill. AZ SOHA NE ÉRJEN A
5. SZEMÉHEZ
6. Használaton kívül, mindig tartsa jól lezárva a flakont.

Figyelmeztetések:

1. Ne használja, ha allergiás bármelyik összetevőre!
2. Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, ne használja, és forduljon orvoshoz. A dobozt vigye magával és mutassa meg az orvosnak!
3. Gyermekek elől elzárva tartandó!

ACUAISS EYE RELAX 15 ml

Összetétel: Hyaluronic acid, hydroxyethyl cellulose, sodium tetraborate, boric acid, EDTA 0.02%

ACUAISS Ultra 10 ml – tartósítószer mentes

Összetétel: Sodium hyaluronate 0.15%, sodium chloride, disodium phosphate, monosodium phosphate, edetate disodium and purified water.

ACUAISS Dual Gel – 15 ml

Összetétel: Sodium hyaluronate 0.30%, hydroxyethyl cellulose 0.10%, edetate disodium 0.02% and purified water

Gyártó: DISOP ALCOBENDAS (Valdelaparra 31-A, Madrid, Spanyolország) CE0318