



**HIDRO HEALTH RGP ONE STEP
UNIVERZÁLIS KONTAKTLENCSE-ÁPOLÓ
FOLYADÉK
RGP és PMMA lencsékhez**

A HIDRO HEALTH RGP ONE STEP univerzális kontaktlencse-ápoló folyadék a kemény és gázáteresztő lencsék összes típusának tisztítására, fertőtlenítésére és öblítésére alkalmas.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Mosson kezet, mielőtt a lencsékhez érne.
2. Vegye ki az egyik kontaktlencsét, és helyezze el a tenyerében. Csepegtessen rá HIDRO HEALTH RGP ONE STEP univerzális kontaktlencse-ápoló folyadékot, és mutatóujja segítségével finoman dörzsölje meg mindkét oldalát húsz (20) másodpercig.
3. A megtisztított lencsét helyezze be az üres tartóba, majd a tartót töltsse fel friss HIDRO HEALTH RGP ONE STEP univerzális kontaktlencse-ápoló folyadékkal, hogy teljesen belepje a lencsét.
4. Mindezt ismételje meg a másik kontaktlencse esetében is.
5. A megfelelő fertőtlenítés érdekében a kontaktlencsétet tartsa egész éjszaka, de legalább hat (6) órán át az ápolófolyadékkal megtöltött, zárt tartóban.
6. A kontaktlencsétet behelyezés előtt öblítse át öt (5) másodpercig, hogy a felületüket teljesen megtisztítsa az esetleges rátapadt szennyeződésektől. Ezután behelyezheti őket.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A folyadék egyszeri használatra készült. Naponta cserélje a HIDRO HEALTH RGP ONE STEP ápolófolyadékot a lencsetartóban.
2. Ha a terméket nem használja, jól zárja le a tetejét, és ne engedje, hogy cseppentője bármilyen felülettel érintkezzen.
3. Ne használja a terméket, ha bármelyik összetevőjére allergiás.
4. Ha a termék használata folyamatos irritációt vált ki, vegye ki a kontaktlencsétet, és forduljon szemorvoshoz.
5. Az ápolófolyadékot szobahőmérsékleten tartsa.
6. A lencsetartókat rendszeresen tisztítsa, és hagyja a levegőn megszáradni.
7. A terméket tartsa gyermekektől távol.

ÖSSZETÉTEL

Steril és pufferelt fiziológiás sóoldat, mely hidroxipropil-metil-cellulózt, poloxamert, bórsavat, nátrium-borátot, nátrium-kloridot tartalmaz dinátrium-edetát 0,1%-os és polihexametilén-biguanid 0,0004%-os tartósító oldatában.