

HIDRO HEALTH

SPECIÁLIS UNIVERZÁLIS SZILIKON-HIDROGÉL KONTAKTLENCSÉ TISZTÍTÓ FOLYADÉK

Szilikon-hidrogél lágy lencsék specifikus tisztítási és kondicionálási kezelésére. Fertőtlenít, tisztít, eltávolítja a fehérje lerakódásokat, nedvesít és öblít.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Mosson kezet, mielőtt a lencsékhez érne.
2. Vegye ki az egyik kontaktlencsét és öblítse azt le néhány másodpercen keresztül.
3. Csepegtessen a lencsére három-négy cseppet az univerzális ápolófolyadékból és ezt 10-20 másodpercen keresztül finoman dörzsölve, tisztítsa le.
4. Töltse fel a kontaktlencse tartót megfelelő mennyiségű ápoló folyadékkal úgy, hogy a megtisztított lencse behelyezésekor, ez teljesen belepje a lencsét, majd helyezze a tartóba a megtisztított lencsét.
5. Vegye ki a másik kontaktlencsét és ismétlje meg ezeket a műveleteket.
6. A megfelelő fertőtlenítés érdekében, a kontaktlencsétet tartsa egész éjszaka, de legalább hat órán keresztül az ápolófolyadékkal megtöltött, zárt tartóban.
7. Behelyezés előtt, néhány másodpercen keresztül, öblítse át a termékkel a kontaktlencsétet. Ha a lencse viselésekor, homályosan lát vagy a szem kiszáradását észlelné, megnedvesítheti a kontaktlencsétet. Csepegtessen közvetlenül ezekre, vagy közvetlenül a szembe, egy-két csepp terméket, majd pislogjon többször.

FIGYELMEZTETÉSEK

- A lencsék újbóli fertőtlenítéséhez, öntse ki az előző napi, fennmaradó ápolófolyadékot a tartóból, majd töltsen fel új folyadékkal.
- Ha a terméket nem használja, jól zárja le a tetejét, és ne engedje, hogy a cseppentője bármilyen felülettel érintkezzen.
- A terméket megkezdése után 90 nappal ne használja.
- A terméket a gyermekektől tartsa távol.
- Ne használja a terméket, ha bármelyik összetevőjére allergiás.
- Ha a termék használata folyamatos kellemetlenséget vagy irritációt vált ki, vegye ki a kontaktlencsétet, ne használja tovább a terméket és forduljon kontaktlencse szakértőhöz.
- A kontaktlencsétet, maximum 30 napon át, lehet a zárt tartóban tárolni.

ÖSSZETÉTEL

A folyadék, nátrium-kloridot, mononátriumfoszfátot, nátriumfoszfátot, nátrium citrátot, poloxamert, macrogol hidrox-sztereátot, 0,2%-os dinátrium-edetátot és 0,0002%-os polihexametilén-biguanidot tartalmaz.

A TERMÉKEN TALÁLHATÓ JELZÉSEK:

Tételszám, szavatossági idő, CE0318, STERILITÁS/A, Figyelmeztető jelzés, KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK VÉDJEGE